

Prüfliste visuelle Inspektion

Stuhl-Nr.:

Zur Wartung Ihres Rettungstuhls sollten Sie regelmäßige Inspektionen durchführen. Evacusafe möchte Sie mit dieser Prüfliste unterstützen. Inspektionen sollten vierteljährlich durchgeführt werden oder je nach Einsatzhäufigkeit auch öfter. Evacusafe empfiehlt den Wechsel der Antriebsriemen nach 5 Jahren, um die optimale Einsatzbereitschaft des Rettungstuhles zu gewährleisten.

TEIL	PRÜFUNG	OK (JA/NEIN)	HINWEIS
Schutzhülle	Vorhanden und unbeschädigt.		
Wandbefestigung	Vorhanden und unbeschädigt.		
Stuhl	Klappmechanismus öffnet sich leichtgängig.		
Fußstütze (wo vorhanden)	Öffnet sich und Befestigung ist unbeschädigt.		
Armstützen (nur Riemensystem)	Klappfunktion und Befestigung sind unbeschädigt.		
Rückenverriegelung Handgriff/Kopfstütze (nur Riemensystem)	Beweglich, leichtgängig, Griff verriegelt, unbeschädigt.		
Riemensystem Verriegelung (nur Riemensystem)	Beweglich, leichtgängig, Riemensystem verriegelt.		
Riemen (nur Riemensystem)	Riemen lassen sich bewegen, keine Risse. (Sollten wenigsten alle 3 Monate bewegt werden.)		
Verschlüsse	Bitte öffnen und ölen. (Mit z.B. WD40 Spray.)		
Sitzgurt	Verstellbarkeit funktioniert, Verschlüsse leichtgängig. Auf Risse überprüfen.		
Hinterradbremse (wo vorhanden)	Hinterradbremse öffnet und schließt sich.		
Material Sitzfläche	Sicher an den Befestigungspunkten, keine Risse vorhanden.		
Muttern/Bolzen	Alle vorhanden und fest. Schutzkappen vorhanden.		
Vorderräder (wo vorhanden)	Räder rotieren und laufen leichtgängig.		
Hinterräder	Laufen leichtgängig.		

Name:

Datum, Unterschrift:

- Garantie auf alle beweglichen Teile: 2 Jahre. Garantie auf den Riemenantrieb: 5 Jahre.
- Schäden/Abnutzung durch Vandalismus oder unsachgemäße Nutzung werden nicht durch die Garantie gedeckt.
- **Im Falle eines größeren Schadens muss der Stuhl aus dem Gebrauch genommen und ersetzt werden.**